

同期(更新)の方法

* 60~90日に1度*

通常の更新は2~3分ですが、Firmwareの更新時は20分~30分ほど時間のかかる場合があります。(お急ぎの場合は”Skip update”を選択)※詳細は15ページ参照

iPhone/アンドロイド/iPad等の端末を用意してください。



端末のBluetooth機能が作動していることを確認してください。

* アプリ毎のbluetooth設定もご確認ください。

* Wi-fiはOFFにすると、通信障害が起こりにくくなります。

* アンドロイドは、位置情報を「オン」にしてください

Dermapen 4™の電源がOFFになっていることを確認し、**電子メールアドレスとパスワード**でアプリケーションにログインしてください。

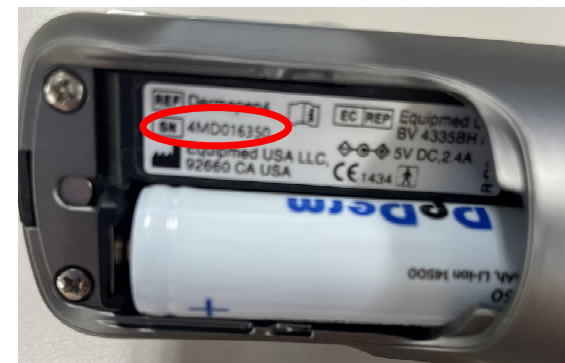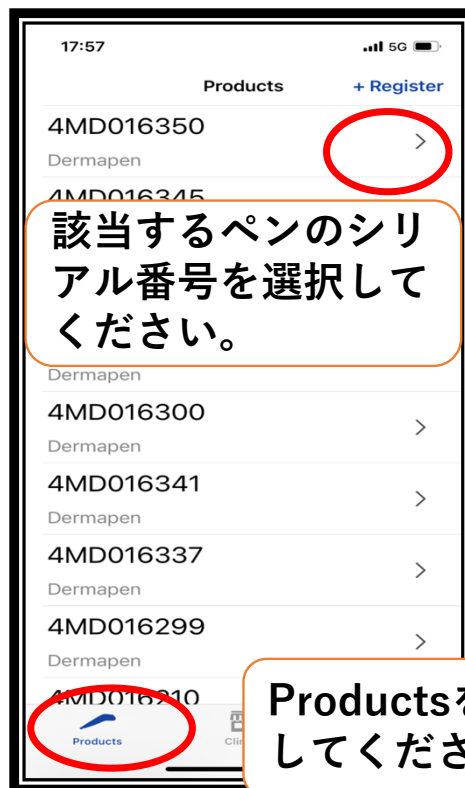

シリアル番号は本体蓋裏の4MDから始まる数字です。

この画面を開きながら、
Dermapen 4™本体電源を入れ、Bluetooth マークがでて
いることを確認してから、
【connect and sync】をタップ
します。

*ダーマペン本体にBluetoothマーク
が出た状態でないとボタンは押せませ
ん。

ペアリングを開始しない場合
は、深度と速度の+ボタンを
同時に5秒程押します。

*インジケータ(ダーマペンの表示画
面)に5~6桁のBluetooth パスキーが
表示されることがあります。⇒その場
合はアプリに入力



同期後は【successfully synchronised】の表示がでていることを確認してください。

何らかのエラーが起きた場合は、端末(携帯等)を再起動することで正常に作動することがあります。

*アップデート中は Dermapen 4™の電源を切らないでください。更新を中断した場合、Dermapen 4™の使用を再開するには再度同
期する必要があります。更新作業中は電源アダプタの使用をお勧めします。


ファームウェアの更新

ファームウェアの更新は3か月に1度の同期とは別に不定期に表示がされます。機械を最適な状態にて使用継続するために必要な作業なので必ず行ってください。

- ※ファームウェアの更新を行わないと針を認識しなくなります。
- ※ファームウェアの更新には20~30分お時間がかかります。

firmwareの更新中はアプリの画面表示を常に明るくする必要があります。
※画面が暗くなると、更新も中断されます。

設定の画面表示から、画面が暗くならないよう設定の変更をしておいてください。

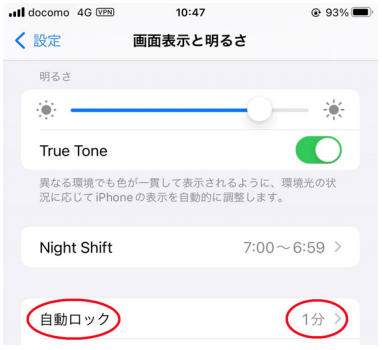

※イメージ (iPhoneの設定画面です)

※ファームウェアの更新中は他のアプリや機能はご使用いただけません。



Updateを選択

更新中
※ファームウェアの更新時は下に%が表示されます

更新完了

ファームウェアの更新後に同期を行う必要があります。

*ファームウェアの更新はアップデート中は同期とは別の作業です。ファームウェアの更新終了後、再度アプリ内で同期を行う必要があります。14ページの手順を再度行ってください。